

ATEMSCHUTZMASKE DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR





Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel zur Anwendung im Gesundheitsbereich



FEATURES:

- Anpassbarer Nasenbügel
- Einfache und sichere Befestigung mit Bändern hinter den Ohren
- Enthält keine Komponenten aus Naturkautschuklatex
- FFP2 NR
- DIN EN 149:2001+A1:2009
- CE

FILTRIERENDE HALBMASKE FFP2 NR

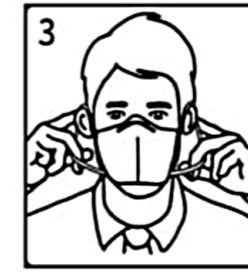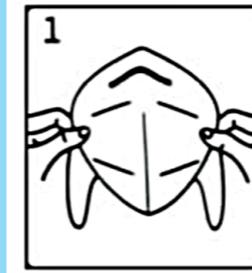

GEBRAUCHSANLEITUNG

ANWENDUNGEN:

- **FFP2:** Filtrierende Halbmasken der Kategorie 2 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 10 fachen des jeweils gültigen AGW- bzw. TRK-Wertes.
AGW=Arbeitsplatzgrenzwert

PRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, **NUTZEN SIE DIE MASKE AUF KEINEN FALL.** Benutzen Sie eine neue Maske.

AUFSETZANLEITUNG:

1. Maske so in die Hand nehmen, dass die beiden Bänder frei nach unten hängen. Maske unter dem Kinn mit dem Nasenbügel nach oben anlegen.
2. Metallenen Nasenbügel mit leicht zusammendrücken, um eine optimale Abdichtung im Nasenbereich zu erzielen. Benutzen Sie dazu die Fingerspitzen beider Hände. Wenn Sie nur eine Hand verwenden, kann dies zu einem weniger effektiven Sitz des Atemschutzgeräts führen.
3. Führen Sie die seitlichen Bänder der Maske hinter Ihre Ohren, damit diese die Maske sicher auf dem Gesicht halten.
4. Funktionsprüfung für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil: Indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und kräftig ausatmen. Bei Luftaustritt am Nasenbügel muss dieser stärker angedrückt werden. Bei anderen undichten Stellen den Sitz der Maske leicht verändern und der Gesichtsförm anpassen.

WARNHINWEISE:

1. Missachtung der hier gegebenen Anweisungen oder Anwendungsbeschränkungen für dieses Produkt können die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren und Übelkeit oder gar Tod zur Folge haben.
2. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essentiell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieser Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.
3. Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre einen zu geringen Sauerstoffanteil enthält.
4. Atemschutzmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellen.

5. Benutzen Sie die Maske nicht in einer explosiven Atmosphäre.
6. Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atmen schwierig wird, (b) Schwindel oder Erschöpfung auftritt.
7. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsförm können unter Umständen die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren.
8. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.
9. Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Pflege notwendig. Nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.
10. Die Haltbarkeit des ungeöffneten Produkts beträgt fünf (5) Jahre ab Datum der Herstellung bei Lagerung im Temperaturbereich von -20°C bis +30°C und bei weniger als 80% relativer Luftfeuchtigkeit. Prüfen Sie vor der ersten Verwendung immer, ob das Produkt innerhalb der angegebenen Haltbarkeitsdauer liegt. Verwenden Sie bei der Lagerung oder dem Transport dieses Produkts die mitgelieferte Originalverpackung und schützen Sie die Masken bis zum Gebrauch vor direkter Sonneneinwirkung.
11. Nicht für Dolomit geprüft.

Import/Vertrieb durch:

Sunlumo Technology GmbH
Technologiepark 17
4320 Perg, Österreich
trading@sunlumo.at

Stand: 04/2020
Manufacturer Product Code: 1282

